

Premofix® Brachialis T

Premofix® Brachialis T – transparent tryckbandage med integrerad kompress för vård av punktionshål i arm.



Desinficera den transparenta ytan av Brachialis T innan applikation.

1. Innan du börjar, sträck ut armen helt, fixera armen på utsidan över armbågen med tejp, så att den inte går att böja.

2. Innan du drar ut introducern kan du placera Brachialis T ovanför eller ovanpå punktionshålet. För bästa resultat; utför manuell kompression på punktionshålet i 5-10 minuter innan Brachialis T appliceras. Se till att dragbandet är på insidan av armen.

3. Om du använder Brachialis T för omedelbar vård kan du placera Brachialis T på introducern, dra ut introducern och komprimera omedelbart när introducern dragits ut.

4. Dra sedan åt bandaget, dra rakt upp med ena handen och tryck kompressionskudden med den andra handen. Dra aldrig bandet i sidled eftersom kudden då också rör sig i sidled.

5. Fixera kardborrebandet, kontrollera pulsen och punktionsstället. Av säkerhetsskäl, gör det igen efter 2-5 minuter.

6. Ibland kan man av säkerhetsskäl behöva sätta en fixeringstejp ovanpå kardborrebandet.

7. Rekommenderad kompressions-tid för fullgott resultat med stoppad blödning: 30-60 minuter. I enstaka fall kan det krävas lite längre tid och det föreligger ingen patientfara i dessa fall så länge patienten ej känner obehag.

Premofix® Brachialis T

Transparent tryckbandage för punktionshål i arm.
För engångsbruk.

Art nr: DV1085T
30 st per kartong

QM-certifierat: DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 9001
Tillverkas i Tyskland av Andanza International

