


Tum-E-Vac® slutet magsköljningsset

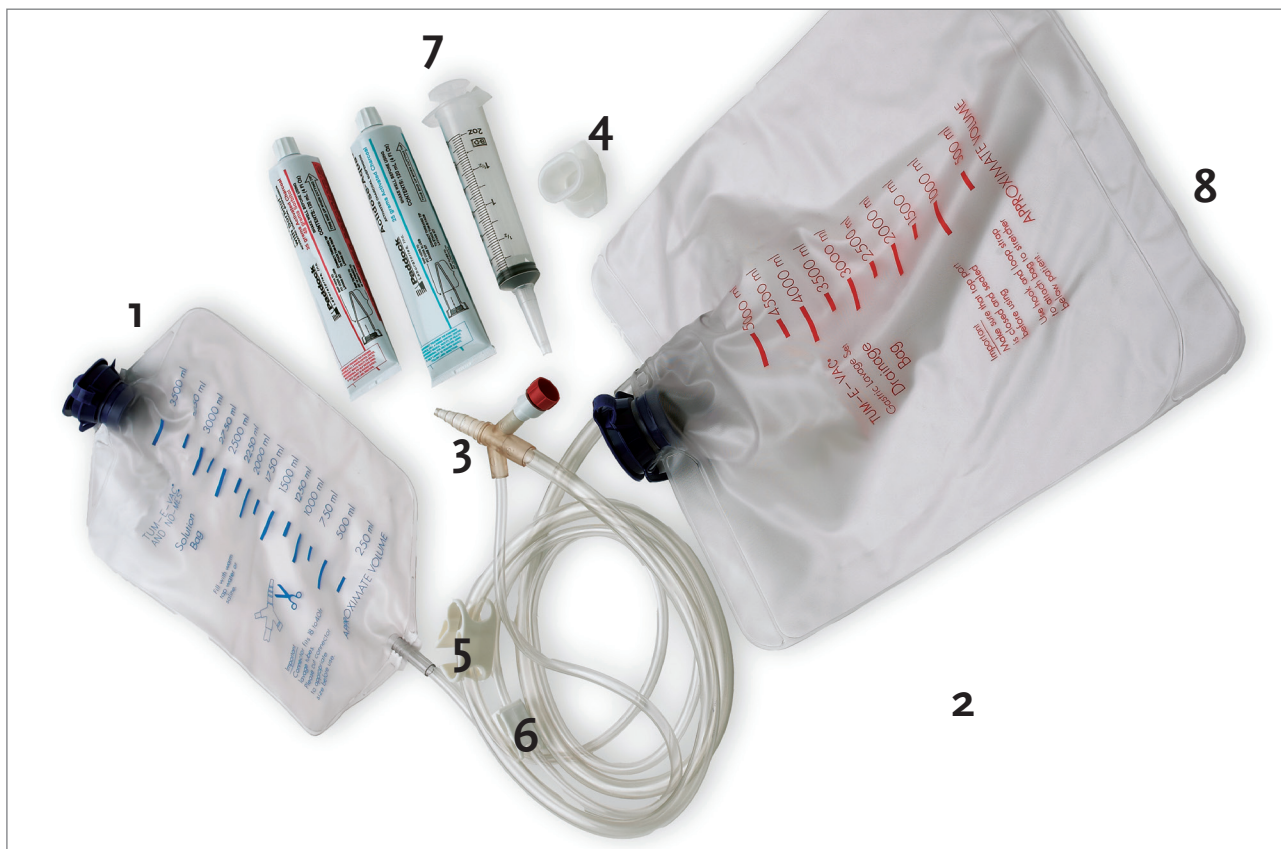

Används vid ventrikelsköljning

1. Påse 3,5 liter för rent vatten, påfyllbar*
2. Magsond med atraumatisk spets, röntgenindikering samt stora dränagehål
3. Trippelanslutning, med trimbar anslutning för magsond
4. Bitblock
5. Klämma "Bull clamp" för avstängning/öppning för tillföring av vätska
6. Klämma för stängning/öppning för tömning av vätska
7. Aspirationsspruta för aspirering vid tillfälligt stopp i magsond
8. Påse 5 liter för tömningsvätska/ventrikelinnehåll, tömningsbar*

Tum-E-Vac® – slutet system för ventrikelsköljning. Komplet set med 32 F magsond med atraumatisk spets, röntgenindikering samt stora dränagehål.

Art. Nr. 2054

10 st per kartong

Bruksanvisning:

1. Ha en droppställning till hands
2. Tag den stora påsen och lägg den på golvet, tillse att locket är stängt. Tag den mindre påsen, stäng klämman, håll i vatten och häng upp den på droppställningen.
3. Klipp Y-kopplingen enligt anvisningen för 28F eller 32F.
4. Sätt bitblocket i munnen på patienten och för igenom magsonden.
5. Anslut magsonden till y-kopplingen, och det är klart att skölja.
 - A. Öppna den övre slangklämman, vattnet rinner då ner i patienten.
 - B. Stäng den övre klämman och öppna den nedre. Tillse att patienten tömmer ut all vätska.

*** OBS! Om ni behöver fylla på mer vätska i den övre mindre påsen, så måste den undre större påsen tömmas först.**

SMP+ Cardio